

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boucle d'induction avec tour de cou. Téléphonnez désormais en profitant d'une liberté inédite. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Boucle d'induction avec microphone
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

Vous trouverez des mini oreillettes adaptées sur www.pearl.fr, sous la référence HZ2121.


Description du produit

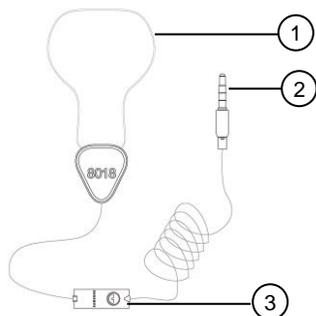

1. Boucle d'induction avec microphone
2. Connecteur jack 3,5 mm
3. Amplificateur

Utilisation

1. Suspendez la boucle d'induction autour de votre cou et branchez-la à votre appareil mobile à l'aide de la fiche jack. La boucle d'induction est reconnue automatiquement en tant que micro-casque.

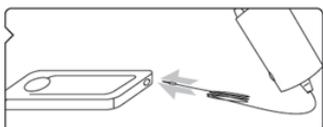

2. Insérez la mini oreillette (non fournie) dans votre oreille.
3. Lancez la lecture d'une chanson depuis votre appareil mobile, afin de vérifier que le son est correctement transmis. Ce faisant, réglez le volume sonore souhaité sur l'appareil mobile.



NOTE :
Afin de ne pas endommager votre audition, commencez par régler le son sur le minimum avant d'insérer l'oreillette dans votre conduit auditif.

Téléphoner

Vous pouvez maintenant établir une connexion avec le correspondant de votre choix. Composez un numéro de téléphone et laissez la connexion s'établir.



NOTE :
Votre voix est transmise par un microphone situé dans la boucle d'induction.

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez le prendre à l'aide du bouton Accepter.

Dépannage

Plus aucune fonction avec le smartphone / téléphone portable ?

- Comparez le connecteur audio (à induction) avec le connecteur audio de votre kit mains libres d'origine, et assurez-vous que les connecteurs sont identiques.
- Si les deux sont identiques, contactez le fabricant de votre smartphone / téléphone portable.

Des bruits parasites dans l'oreillette ?

Il est possible que le volume sonore soit trop élevé. Tournez le bouton de réglage du volume vers le bas, afin de diminuer les bruits parasites dans l'oreillette.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2120 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.05.2016